

# Bedienungsanleitung

## Caresana Inkontinenz-Panties

**Hersteller:** Caresana GmbH, In der Spöck 12, 77656 Offenburg

**Produkt:** Inkontinenz-Panties für mittlere Inkontinenz

**Verfügbare Größen:** S, M, L, XL

**Einwegprodukt**

---

## 1. Produktbeschreibung

Die Caresana Inkontinenz-Panties sind speziell für Personen mit mittlerer Inkontinenz entwickelt. Sie bieten zuverlässigen Schutz durch eine mehrlagige Struktur:

- **SAP-Kern (Superabsorber-Polymer)** für maximale Flüssigkeitsaufnahme und Geruchsbindung
- **Weiche Non-Woven-Lagen** für angenehmen Tragekomfort
- **Atmungsaktive Außenlage** zur Reduzierung von Hautreizungen




Das Produkt ähnelt Unterhosen und kann diskret getragen werden.

---

## 2. Anwendung & Nutzung

### Anlegen der Inkontinenz-Panties

1. Ziehen Sie die Panties wie normale Unterwäsche über die Beine hoch.
2. Achten Sie darauf, dass sie richtig sitzt und eng anliegt, um ein Auslaufen zu verhindern.

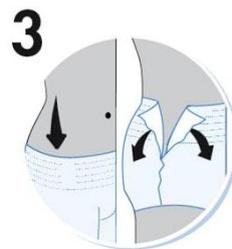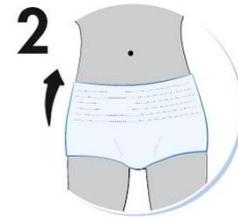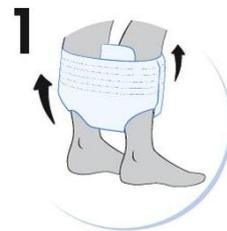

### Ausziehen der Inkontinenz-Panties

1. Zum Entfernen die Außennaht an beiden Seiten (links und rechts) aufreißen.
2. Die Panties lassen sich nun wie eine offene Windel entfernen.
3. Nach Gebrauch zusammenrollen und sicher entsorgen.

### Tragedauer & Wechselintervall

- Nicht länger als **12 Stunden** tragen.
  - Bei vollständiger Sättigung vorher wechseln.
-

### 3. Sicherheit & Risiken

#### Sicherheitshinweise

- Nur für **mittlere Inkontinenz** geeignet.
- Nicht bei schwerer Inkontinenz oder unkontrollierbarem Harnverlust verwenden.
- Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen die Nutzung einstellen und einen Arzt konsultieren.

#### Mögliche Risiken

- Längeres Tragen kann zu Hautirritationen führen.
  - Bei bekannter Unverträglichkeit gegenüber den verwendeten Materialien nicht verwenden.
- 

### 4. Pflege & Entsorgung

#### Lagerung

- Kühl und trocken lagern.
- Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden.
- Haltbarkeit: **3 Jahre ab Herstellungsdatum**.

#### Entsorgung

- Die Inkontinenz-Panties sind **Einwegprodukte** und gehören in den **Restmüll**.
  - Nicht in die Toilette werfen!
- 

### 5. Kennzeichnung & Verpackung

- **CE-Kennzeichnung** bestätigt die Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards.
  - Jede Verpackung enthält eine **Chargennummer** zur Rückverfolgbarkeit.
- 

### Herstellerkontakt

#### Caresana GmbH

In der Spöck 12

77656 Offenburg

Deutschland

Tel: 0781 953 80 600

Fax: 0781 953 80 609

mail@caresana.eu